

# MeLuna – Innovationen aus Kunststoff

---



Industriestrasse 7  
Gunzenhausen, Bayern 91710  
Deutschland

Telefon: +49 9831 8802892

die Menstruationstasse "made in Germany" Menstruationstasse -

Menstruationsbecher - Menstruationskappe -

es gibt in der deutschen Sprache kein wirklich gutes Wort dafür. Sagen Sie doch einfach :-)

Der Begriff "Tasse" oder "Becher" kommt von der englischen

Bezeichnung "menstrual cup". In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde diese Methode der Monatshygiene erfunden. Die Amerikanerin Leona Chalmers hat das

Patent damals eingereicht. Das Prinzip funktioniert ganz einfach so: Man nehme ein

kleines, biegsames, weiches Becherchen. Dieses wird in die Vagina eingeführt. Dort sammelt sich nun die Menstruationsflüssigkeit. Nach einigen Stunden entnimmt

man das Becherchen wieder und entleert es. Reinigen und wieder einsetzen...

Eine, wie wir finden, wirklich sensationelle, umweltschonende, praktische und

kostengünstige Idee! Seit einigen Jahren finden immer mehr Frauen zu dieser Form der Monatshygiene. Welche passt zu mir? Weil jede Frau anders ist... erhältlich in 4 unterschiedlichen Durchmessern, in 2 unterschiedlichen Längen, in 3

unterschiedlichen Weichheitsgraden, mit 3 unterschiedlichen Griffvariationen

Hier finden Sie Informationen zur Größenwahl Wie Sie die verwenden Einfache Anwendung und schnell zu erlernen...Hände waschengesäuberte Me

Luna faltengefaltet einführen nach circa 8 Stunden herausnehmen, ausspülen und wieder einsetzen Hier finden Sie Informationen zur Anwendung Ist die auch sicher? Erfahren Sie mehr über die Herstellung Aus welchem Material wird Me Luna gemacht? Woher kommt das Material? Sind Weichmacher enthalten? Ist Me Luna für Allergiker geeignet?

Hier finden Sie Informationen zum Material Wie Sie die reinigen Hinweise und praktische Tipps zur Desinfektion Einfach mit kochendem Wasser Praktische Tipps für unterwegs Chemische Reinigungsmittel Hilfreiche Hausmittelchen Hier finden Sie Informationen zu Reinigung und Pflege

[Website besuchen](#)

[Anfrage senden](#)

[Eintrag weiterleiten](#)

